

HEDE SAFETY

Vi gör det bättre!



www.hedesafety.se

Innehåll:

1. Introduktion – Hjärtstartare Räddar liv.
2. Hur man använder CardiAid.
3. Underhåll.
4. Sammanfattning och priser.

CardiAid



Plötslig hjärtstopp kan drabba alla – Hjärtstartare räddar liv!

Varje år drabbas ca: 10 000 personer av plötslig hjärtstopp i Sverige. Av dessa överlever färre än 10% utan tillgång till direkt hjälp med hjärtstartare.

Det som vanligtvis händer är att de elektriska signalerna i hjärtat tappar kontrollen och börjar flimra, vilket innebär att hjärtat inte kan pumpa blod och förse kroppen med syre.

En elektrisk stöt med en defibrillator kan ofta få hjärtat att slå igen, men tiden är av största vikt. För varje minut som går minskar risken för framgångsrik hjärtstart med cirka tio procent.



Tillkalla hjälp



Påbörja HLR



Hämta AED

CardiAid är designad så att den kan användas av vem som helst, var som helst.

Det gör CardiAid till en av de mest användarvänliga defibrillatorerna på marknaden.

- CardiAid **startar automatiskt** när luckan öppnas
- CardiAid har **föranslutna elektroder**, vilket sparar tid och gör defibrillatorn enklare att använda
- CardiAid **vägleder användaren steg för steg** genom röstkommandon, illustrationer och ljus. Det gör det enkelt att utföra alla steg korrekt, även om användaren har begränsad kunskap och erfarenhet.
- CardiAid vägleder användaren **via metronomiska signaler**, för att enkelt hitta rätt rytm när bröstkompressioner utförs.
- Alla **funktioner som kan distrahera användaren har utelämnats** från CardiAid hjärtstartare. CardiAid har varken display för EKG eller på/av-knapp.
- **CardiAid är helt säker att använda.** Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att det inte är möjligt att avge en stöt om inte defibrillatorn anser det nödvändigt.

HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV

Vi gör det bättre!

När du ser en person som ligger medvetslöst:

Se till att personen och folket i omgivningen är säkra.

Se över efter respons från offret. Skaka försiktigt på offrets axel och fråga: "Är du okej?"

Om offret ger respons:


Lämna personen i samma position som du fann personen i, förutse att det inte finns någon ytterligare fara.

Försök att tareda på vad det är som har hänt och vad som är fel. Sök efter hjälp om det behövs.

Uppmärksamma offret regelbundet.

OM DEN DRABBANDE PERSONEN EJ SVARAR ROPA EFTER HJÄLP OCH FÖLJ DESSA 12 STEG:

Hur MAN ANVÄNDER CARDIAID

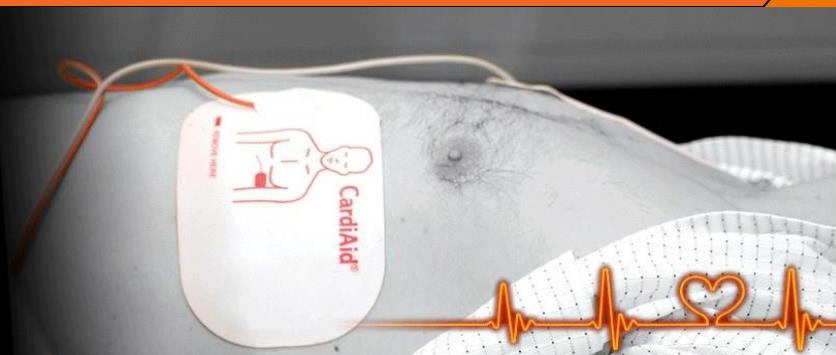

Beställ enkelt från hedesafety.se


- 

Lägg den skadade på rygg. Öppna luftvägarna genom att luta huvudet bakåt och känen uppåt. Titta, lyssna och känn på andningen
- 

Är andningen onormal eller frånvarande, be någon ringa 112 och skicka iväg någon att hämta en hjärtstartaren. Påbörja HLR och fortsätt med det till dess att hjärtstartaren kommer.
- 

Om du är ensam, använd din telefon för att kontakta räddningstjänsten
- 

Cardiaid startas automatiskt när locket öppnas. Följ rösten och illustrationerna.
- 

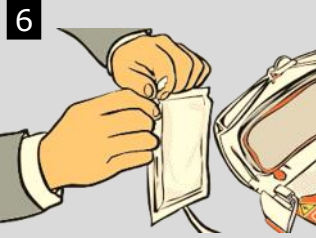Tag av kläderna från patientens bröst. Om det behövs, använd saxen i ditt första hjälpen-kit till att klippa upp kläderna.
- 

Öppna paketet med elektroderna.
- 

Tag av plasten på den ena elektroden och placera elektroden på den skadades bara bröst enligt instruktioner på förpackningen.
- 

Tag av plasten på den andra elektroden och placera elektroden på den skadades bara bröst enligt instruktioner på förpackningen.
- 

Cardiaid påbörjar en analys av hjärtats rytm på en gång. Rör inte den skadade.
- 

Cardiaid talar om för dig, om det är nödvändigt att avge en stöt eller inte. Om det är nödvändigt, förbereds stöten automatiskt. Maskinen avger sedan en automatiskt stöt efter en förvarning.
- 

Cardiaid fortsätter med att guida dig genom hjärt- och lungräddningen. Följ röstinstruktionerna och ge först 30 stycken bröstkompressioner. Cardiaid avger en metronomisk signal som du kan följa för att utföra bröstkompressionerna i rätt rytm.
- 

Ge 2 stycken mun mot muninblåsningar efter 30 stycken bröstkompressioner. Fortsätt med hjärt- och lungräddning till du hör "undvik att röra den skadade från och med nu".

Alla hjärtstartare ska underhållas. Även CardiAid.

Det beror på att batterier och elektroder har begränsad hållbarhet och bör därför med tiden bytas ut.

CardiAid defibrillator underhålls genom service vartannat år, då också batterier och elektroder ersätts. Kommer defibrillator till användning, ska hjärtstartaren dessutom ha service även efter användning.

Service av CardiAid Hjärtstartare görs smidigast genom att skicka defibrillatorn till oss så hjälper vår servicetekniker till med utbyte av elektroder samt programuppdatering. Vi tar endast betalt för materialkostnaden av utbytesdelar!

Beställ tid och betala per gång

Kontakta oss för tidsbokning av service från gång till gång. Defibrillatorn blinkar rött när det är dags för service och då är det dags att boka tid. Fakturering sker efter utförd service.

Teckna ett serviceavtal för ett lågt, fast pris per månad så tar vi hand om hela underhållet

Du kan också välja att teckna serviceavtal. Betala en fast låg månadsavgift som täcker alla de tjänster som defibrillatorn kan behöva för en lång hållbarhet. Både de återkommande och de som måste ske då defibrillatorn kommer i bruk.

Med ett abonnemang får du obegränsad service under avtalstiden. Den periodiska underhållet behöver du inte tänka på. Vi kommer att kontakta dig när det är dags för oss att ge din hjärtstartare service.

**UNDERHÅLL
AV CARDIAID
HJÄRTSTARTARE**

Vi gör det bättre!

CardiAid självtest och egenkontroll

CardiAid defibrillator genomför automatiskt ett dagligt självtest för att kontrollera att alla delar fungerar som de ska.

Är allt i ordning så lyser statusindikatorlampan grönt. När defibrillatören hittar ett problem kommer indikatorn att blinka rött och ge ett muntlig fel.

Vi rekommenderar att du håller ett öga på statusindikatorerna och var tredje månad gör en ordentlig egenkontroll av defibrillator.

Så gör du en egenkontroll av CardiAid defibrillator:

- Kontrollera att det finns en grön lampa som blinkar och en OK symbol.
- Öppna locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
 - Alla lampor lyser under en kort tid direkt efter att luckan öppnas.
 - OK symbolen lyser hela tiden.
 - Röstinstruktioner påbörjas.
- Stäng locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
 - Röstinstruktionen stoppar.
 - OK-symbolen blinkar.
- Kontrollera hjärtstartarens utseende och skick. Defibrillatören får ej vara skadad.
- Kontrollera tillbehören. Alla tillbehör måste vara intakt och oanvända.

IP55 Damm- och Spolsäker

CardiAid klarar tuffa miljöer och har en IP55 klassning.

Detta betyder att damm eller vatten i skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska komponenter och orsakar skada.



Vi gör det bättre!

I priset inkluderas:

- CardiAid Hjärtstartare
- Skyddsväska
- Vägghäste
- AED Skylt för flaggmontage
- Dagliga självtester
- IP55
- 8 års garanti



Beställ enkelt från hedesafety.se

Kampanjpris!

13 750:-

(I kampanjpriset skänker vi 1 000:- till Hjärt & Lungfonden)

Vid köp av fler enheter,
diskutera pris med
säljare.

Vi skickar gärna
kostnadsfri offert.



Kampanjen gäller t o m 2018-XX-XX

Vi gör det bättre!

Hyra

275:-

(Vi har korttids hyror från 6 månader)

Delbetalning

Hos oss kan du delbetala
12 månader räntefritt.

(ex 1 150:-/mån)

Aviavgift på 49:- per
faktura tillkommer.

Låter det intressant?

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Ring oss gärna!

0300-32 39 00

